



Vuxenslottet
Billiga tester med hög kvalitet!

Bruksanvisning

K2/Spice-test

Att tänka på innan test:

- ✓ Testet kan utföras alla tider på dygnet, men säkrast resultat fås om man inte druckit på minst 1 timme innan provtagning för att undvika utspädning av provet.
- ✓ Använd en ren behållare för urinprovet (testa gärna våra egna engångsbehållare).
- ✓ Se till att du vet vart MAX-linjen på testet befinner sig.
- ✓ Använd inte ett test med skadad förpackning.
- ✓ Använd snarast efter du öppnat förpackningen. Långvarig exponering kan påverka resultatet.

Allmänt:

- Våra tester har en säkerhet på 99,6%!
- Om bakgrunden på testet blir rosafärgat är det normalt och inget som påverkar testresultatet
- Våra narkotikatester är endast för "in vitro" diagnostik och är inte juridiskt giltiga.
- Förbränningen av preparat i kroppen varierar kraftigt mellan olika individer.
- **Notera: till skillnad från graviditetstesterna så visar narkotikatesterna endast en (1) linje vid positivt resultat!**

Utförande:

1. Ta ut stickan ur förpackningen.
2. Doppa stickan i en behållare med urin i ett par sekunder. **Se till att inte överskrida MAX-linjen!**
3. Lägg inte stickan på en fuktig eller en absorberande yta!
4. Läs av testet inom 5 minuter! Positivt resultat kan visa sig inom 1 minut. **Får testet ligga längre än 5 minuter kan resultatet påverkas!**

Läsa av resultatet:

Negativt (inget preparat påvisat):

Två linjer visar sig, en i kontrollzonen och en i testzonen. Inget preparat påvisat i urinen.

Positivt (Preparat påvisat):

Endast en linje visar sig i kontrollzonen. Preparat påvisat i urinen, personen har med all sannolikhet brukat preparat.

Ogiltigt:

Om ingen linje uppenbarar sig på testet, eller endast en linje i testzonen så är testet ogiltigt och ett nytt test bör göras.

